


ポジショニング関連用品
ポジパッド ロールタイプ取扱説明書

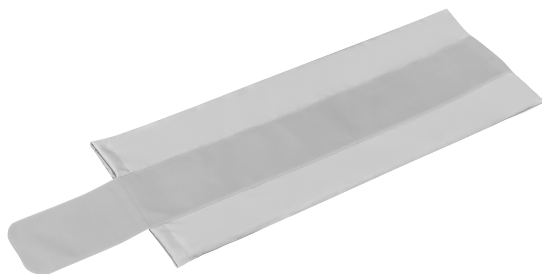

注意事項



警告


- ①必ず医師や看護師などの専門員とご相談の上、安全にご使用ください。
- ②本製品を頭部、顔面付近、または首に巻き付けて使用しないでください。
口や鼻が塞がることによる窒息や、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ③巻いて固定する場合は、きつく締め付けすぎないでください。
血流障害(うっ血)や神経圧迫、組織の壊死を引き起こすおそれがあります。
- ④本製品は良肢位の保持や除圧を目的としたものであり、利用者様の行動を制限するためのものではありません。



注意

- ①装着部位を観察し、皮膚の色、熱感／冷感の有無、しびれ、浮腫(むくみ)がないかを確認してください。
異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ②使用中、ポジパッド ロールタイプがずれたり過度なつぶれが発生していないかを確認してください。
姿勢崩れや思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。
- ③面ファスナーの固定力が低下していないか、異物が付着していないか確認してください。
本来の機能が発揮されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ④本体を強く引っ張らないでください。
外力バー、インナーバッグ、インナークッションが破損する原因となります。

各部の名称

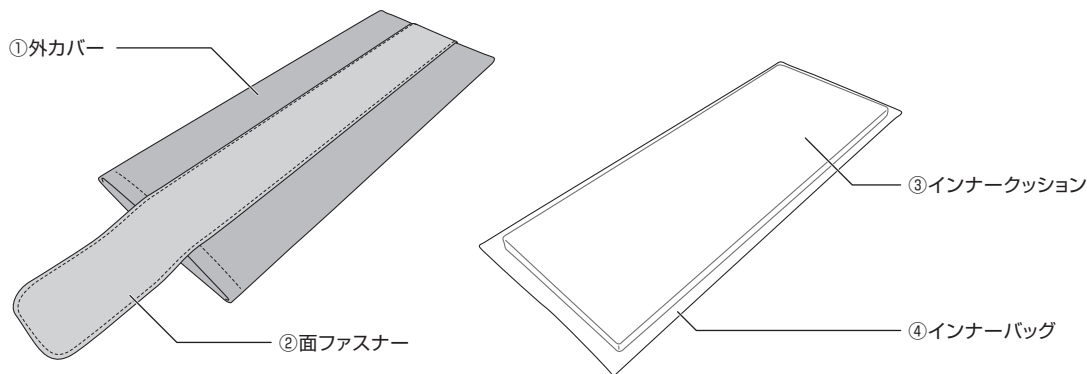

使用方法


目的に合わせて、ポジパッド ロールタイプを丸めたり、腕や脚に巻いてください。
面ファスナーにより、固定することが可能です。



警告

- ①頭部、顔面付近、または首に巻き付けて使用しないでください。
- ②きつく締め付けすぎないでください。
- ③本製品は良肢位の保持や除圧を目的としたものであり、利用者様の行動を制限するためのものではありません。

面ファスナー

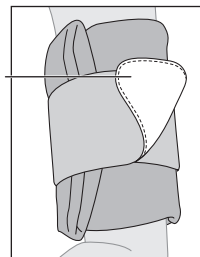

外カバーの洗浄方法

外カバーは洗濯機などで丸洗いしてください。外カバー洗浄後は、乾燥機または天日干ししてください。
面ファスナーに付着した糸くずなどは、一般的な粘着クリーナーで取り除くことが可能です。

- ① 水温は40℃未満で洗浄してください。
※40℃以上の温水で洗浄すると、カバーが縮むおそれがあります。
- ⊘ 柔軟剤の使用は控えてください。
- ① 乾燥機を使用する場合は、設定温度を「80℃以下」にしてください。
※80℃より高い設定温度で乾燥すると、カバーが縮んだり、変形したりするおそれがあります。
- ⊘ 面ファスナーに強力タイプの粘着クリーナーは使用しないでください。
※面ファスナーが傷つき、固定力の低下につながるおそれがあります。

インナーバッグの洗浄、消毒方法

【洗浄方法】

- ⊘ インナーバッグは清拭で洗浄してください。丸洗いはしないでください。
※使用可能な洗剤：●中性洗剤 ●アルカリ性洗剤
- ⊘ 酸性洗剤は素材を痛めるおそれがあるため、使用しないでください。

【消毒方法】

- ① 消毒剤をインナーバッグ全体に噴霧するか、布に染み込ませて清拭してください。
- ① 各消毒剤の使用法、指定濃度および注意事項を守って使用してください。
※使用可能な消毒剤：●エタノール(日本薬局方消毒用エタノール等) ●グルコン酸クロルヘキシジン(5%ヒビテン液等)
●塩化ベンザルコニウム(オスパン等) ●次亜塩素酸ナトリウム(ピューラックス等)※濃度注意
- ① 塩素系洗剤(次亜塩素酸ナトリウム)を使用する場合は、インナーバッグが劣化するおそれがあるため、200～300倍に希釈して使用してください。
- ⊘ シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ⊘ オートクレープなどの高温消毒装置は、インナーバッグが変形するおそれがあるため、使用しないでください。

保 管

- ① 汚れを取り除き、よく乾燥させて保管してください。
- ⊘ 直射日光の当たる場所で保管しないでください。(材質、色が変わるおそれがあります)
- ⊘ 湿気の多い場所で保管しないでください。(カビ発生の原因になります)
- ⊘ 折りたたんだり、丸めた状態で保管しないでください。(変形のおそれがあります)
- ⊘ 重量物を上に置いたまま保管しないでください。(変形のおそれがあります)

仕 様

ポジパッド ロールタイプ

品番 MPTWRF

- 素 材 インナークッション：ポリウレタン
インナーバッグ：ポリウレタン
外カバー：ポリエステル+ナイロン
面ファスナー：ポリエステル
- サイズ 幅30×長さ80×厚さ1cm
※面ファスナーは含みません。

開発・製造元

ISO9001 認証取得

本製品の取扱説明書は下記QRコードからダウンロードいただけます。



取扱説明書

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

札幌/仙台/さいたま/東京/名古屋/大阪/広島/福岡

製品他、各種お問い合わせは

〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目10-97-21

TEL.082-578-9226

E-mail:health@molten.co.jp

〈電話による受付時間〉月曜日～金曜日/9:00～17:00

※祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業日など弊社休業日を除く